

1. FINALIDADE:

Remoção de gordura, manchas, resíduos e embaçamento das lentes dos endoscópios.

2. PRINCÍPIO DO MÉTODO:

Renygel assemelha-se a lubrificação natural, reduzindo o atrito e o desconforto.

3. REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

APRESENTAÇÃO	CÓDIGO	VOLUME
UNITÁRIO – FRASCO SPRAY	480	15 mL

4. COMPOSIÇÃO:

Álcool isopropílico, tensoativo não iônico, água purificada e essência.

5. ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

Para fins de transporte o produto pode permanecer em temperatura ambiente. Armazenar o produto no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente (15 a 30°C), ao abrigo da luz e longe de fontes de calor. Nessas condições, ele é estável até a data de validade impressa no rótulo.

6. AMOSTRAS:

Lentes do endoscópio.

7. MATERIAIS NECESSÁRIOS (não fornecidos)

- Lenço

8. PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Agite bem o frasco do RenyGlass antes de usar;
2. Vaporizar os dois lados da superfície vítrea;
3. Esfregar suavemente as lentes com lenço macio e apropriado;
4. Presença de resíduos, continue a esfregar até a remoção completa das manchas e embaçamento;
5. Enxágue bem as lentes com água estéril;
6. Secar as lentes completamente antes do uso.

9. RESULTADOS

Visualização Aprimorada devido a melhora da imagem após a remoção de embaçamento, sujeira e manchas.

10. LIMITAÇÕES DO MÉTODO

- Determinar a frequência de uso conforme a necessidade dos procedimentos.
- Necessário seguir as recomendações do fabricante do endoscópio para a limpeza das lentes com a aplicação de qualquer agente de limpeza.

11. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar em lentes de contato, laptop, telas LCD.

- Manter longe do alcance de crianças e animais.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Em caso de ingestão beber bastante água.
- Em caso de irritação procure um médico.
- Seguir os processos internos para desinfecção de endoscópios. Produto utilizado apenas em lentes e não possui efeito de sanitizantes.
- Descartar o produto e as amostras de acordo com as resoluções normativas locais, estaduais e federais de preservação do meio ambiente.
- Observar a correlação da versão das instruções de uso e o produto adquirido, conforme disponibilizado no site: www.renylab.ind.br.

12. GARANTIA DA QUALIDADE:

A RenyLab obedece ao disposto na Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é necessário:

- Que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento.
- Que os materiais estejam sendo armazenados nas condições indicadas.
- Que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas condições de uso, manutenção e limpeza.
- Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes específicos, que são repetidos periodicamente conforme calendário estabelecido pela empresa até a data de vencimento.
- Produto degradado e deteriorado não poderá ser utilizado.
- Os certificados de análise de cada lote poderão ser obtidos no site www.renylab.ind.br.
- Em caso de dúvidas, problemas de origem técnica, ou necessidade de obtenção dos mesmos em formato impresso entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) através do telefone (32) 3331-4489 ou pelo e-mail sac@renylab.ind.br.
- Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha da RenyLab, assim como o envio de documentos em formato não impresso, serão enviados sem custos adicionais ao cliente.

13. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: Telefax: (32) 3331-4489 sac@renylab.ind.br

Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

14. TERMO DE GARANTIA

A RenyLab garante a troca deste produto, desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assessoria Técnica que não houve falhas na execução, manuseio e conservação deste produto. A RenyLab e seus distribuidores não se responsabilizam por falhas no desempenho de produtos sob essas condições.

15. FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

RenyLab Química e Farmacêutica Ltda.

Rodovia BR 040 km 697 Caiçaras.

CEP: 36.205-666 - Barbacena - MG – Brasil. Tel.: 55 32 3331-





4489 CNPJ: 00.562.583/0001-44.

Site: www.renylab.ind.br.

Responsável técnico: Renata Carvalho Vaz de Mello.

CRF-MG: 12126.

17. SIMBOLOGIA

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NO RÓTULO DO PRODUTO	
	Limite de temperatura (conservar a)
	Data limite de utilização do produto (dd/mm/aaaa)
	Inflamable
	Provoca irritación ocular