

1. FINALIDADE:

Fixador citológico spray.

2. PRINCÍPIO DO MÉTODO:

Renyfix é um produto para diagnóstico de uso in vitro indicado para fixação de material biológico em lâminas de vidro a partir de material coletado a partir de colo do útero, parede vaginal, etc.

3. REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

APRESENTAÇÃO	CÓDIGO	VOLUME
UNITÁRIO – FRASCO 100 ML	561	100mL

4. COMPOSIÇÃO:

BREU-----	1%
ÁLCOOL 99° Q.S.P-----	100%

5. ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

Para fins de transporte o produto pode permanecer em temperatura ambiente. Armazenar o produto no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz. Nessas condições, ele é estável até a data de validade impressa no rótulo.

6. AMOSTRAS:

Amostras cervicais, esfregaços de fluidos corporais e amostras de tecido.

7. MATERIAIS NECESSÁRIOS (não fornecidos)

- Lâminas.
- Lamínulas.

8. PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Colete a amostra citológica de acordo com as técnicas e procedimentos padrão.
2. Aplique o Fixador Citológico Renyfix diretamente na amostra, cobrindo completamente as células.
3. Deixe a amostra em contato com o fixador por um período de tempo especificado (geralmente alguns minutos) para garantir a fixação adequada.
4. Após a fixação, a amostra está pronta para ser processada e analisada de acordo com os protocolos laboratoriais estabelecidos.

Obs.: Remoção inadequada ou insuficiente antes da coloração, pode resultar em interferências nos resultados.

9. RESULTADOS

Fixação eficiente e preservação adequada das células

10. LIMITAÇÕES DO MÉTODO

- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos.

- Não usar detergentes à base de fosfato.

- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.

- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

11. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Somente para uso diagnóstico “in vitro”.

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.

- Uso exclusivo do médico ou profissional responsável, de acordo com a técnica de domínio dos profissionais.

- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.

- Não usar após data de validade, produto avariados e/ou com embalagens violadas.

- Descartar o produto e as amostras de acordo com as resoluções normativas locais, estaduais e federais de preservação do meio ambiente.

- Observar a correlação da versão das instruções de uso e o produto adquirido, conforme disponibilizado no site: www.renylab.ind.br.

12. GARANTIA DA QUALIDADE:

A RenyLab obedece ao disposto na Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Para que o produto apresente seu melhor desempenho, é necessário:

- Que o usuário conheça e siga rigorosamente o presente procedimento.

- Que os materiais estejam sendo armazenados nas condições indicadas.

- Que os equipamentos e demais acessórios necessários estejam em boas condições de uso, manutenção e limpeza.

- Antes de ser liberado para venda, cada lote do produto é submetido a testes específicos, que são repetidos periodicamente conforme calendário estabelecido pela empresa até a data de vencimento.

- Os certificados de análise de cada lote poderão ser obtidos no site www.renylab.ind.br.

- Em caso de dúvidas, problemas de origem técnica, ou necessidade de obtenção dos mesmos em formato impresso entrar em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) através do telefone (32) 3331-4489 ou pelo e-mail sac@renylab.ind.br.

- Quaisquer problemas que inviabilizem uma boa resposta do produto, que tenham ocorrido comprovadamente por falha da RenyLab, assim como o envio de documentos em formato não impresso, serão enviados sem custos adicionais ao cliente.

13. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto: Telefax: (32) 3331-4489 sac@renylab.ind.br

Nº DO LOTE, DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

14. TERMO DE GARANTIA

A RenyLab garante a troca deste produto, desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assessoria Técnica que não houve falhas na execução, manuseio e conservação deste produto. A RenyLab e seus distribuidores não se responsabilizam por falhas no desempenho de produtos sob essas condições.

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Stanley S. Raphael; Lynch: Técnicas de laboratório; 1986.
2. Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: Métodos de laboratório aplicados à clínica; 1992.

16. FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

RenyLab Química e Farmacêutica Ltda.

Rodovia BR 040 km 697 Caiçaras.

CEP: 36.205-666 - Barbacena - MG – Brasil. Tel.: 55 32 3331-4489 CNPJ: 00.562.583/0001-44.

Site: www.renylab.ind.br

Responsável técnico: Renata Carvalho Vaz de Mello.

CRF-MG: 12126

17. SIMBOLOGIA

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NO RÓTULO DO PRODUTO	
	Limite de temperatura (conservar a)
	Data limite de utilização do produto (dd/mm/aaaa)
	Inflamável
	Provoca irritação ocular